

	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN	Identificación: LIN-CTE-01
		Versión: 0
		Fecha de creación: 02-Julio-2019
		Fecha actualización: 02-Julio-2019

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los factores que nos permiten obtener un resultado confiable en el laboratorio clínico, es que los equipos e instrumentos funcionen adecuadamente y podamos asegurar que valores que indican son los reales, para ello en el Laboratorio de Análisis Clínicos FCQ.UACH hemos desarrollado un programa de mantenimiento preventivo, correctivo y de calibración, el cual se describe en este documento.

El mantenimiento preventivo consiste en el servicio realizado a equipos e instrumentos en periodos establecidos, teniendo como objetivo prevenir fallas en los equipos efectuando los chequeos, ajustes e inspecciones de calidad, tales como limpiezas, reparaciones, cambios de piezas en los equipos, en el momento que se ha cumplido un periodo de tiempo prefijado, entre otros. Esto se hace con el fin de disminuir la posibilidad de producirse una avería en el mismo.

El Mantenimiento correctivo comprende un servicio esporádico el cual se lleva a cabo con el fin de corregir (reparar) una falla en el equipo. Se clasifica en:

No planificado: Es el mantenimiento de emergencia (reparación de roturas). Debe efectuarse con urgencia ya sea por una avería imprevista a reparar lo más pronto posible o por una contaminación imperativa que hay que satisfacer (problema de seguridad, de contaminación, de aplicación de normas legales etc.).

Planificado: Se sabe con antelación que es lo que debe hacerse, de modo que cuando se detenga el equipo para efectuar la reparación, se disponga del personal, repuesto y documentos técnicos necesarios para realizarla correctamente.

	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN	Identificación: LIN-CTE-01
		Versión: 0
		Fecha de creación: 02-Julio-2019
		Fecha actualización: 02-Julio-2019

2. OBJETIVO

Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, que dé seguimiento, demuestre la calibración y el funcionamiento apropiado de los equipos e instrumentos de laboratorio, comprobado mediante la realización de pruebas y verificaciones necesarias.

3. ALCANCE

Dirigido a todos los equipos e instrumentos de los departamentos de laboratorio.

4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El coordinador técnico verificara en los departamentos que los mantenimientos preventivos de los instrumentos de medición se lleven a cabo de acuerdo a los lineamientos que marca el fabricante.

El mantenimiento preventivo de equipos tales como microscopios, centrifugas incubadoras, etc. se deben realizar en los diferentes puntos según el equipo, los cuales se describen en el siguiente cuadro, el coordinador técnico será el responsable de programar los mantenimientos técnicos de los equipos el cual se debe llevar a cabo cada semestre y/o cuando sea requerido.

	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN	Identificación: LIN-CTE-01
		Versión: 0
		Fecha de creación: 02-Julio-2019
		Fecha actualización: 02-Julio-2019

EQUIPO	VERIFICACION	FRECUENCIA
MICROSCOPIO	<ul style="list-style-type: none"> • La lámpara encienda correctamente • Limpiar oculares y objetivos con alcohol Isopropílico al 70% • Mantenimiento técnico 	Cada vez que se usa Cada vez que se usa Semestral
CENTRIFUGAS	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar estabilidad • Limpieza externa • Limpieza a los portatubos • Mantenimiento técnico 	Diario Semanal Mensual Anual
BAÑO MARIA	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura programada • Limpieza • Volumen de agua 	Cada vez que se use Cada vez que se use Cada vez que se use
AUTOCLAVE	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza y desinfección • Mantenimiento técnico 	Cada vez que se usa Anual
INCUBADORA	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza y desinfección • Registro de temperatura • Mantenimiento técnico 	Cada semana Diario Anual
BALANZA ANALITICA	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza • Mantenimiento técnico 	Cada vez que se usa Anual
BALANZA GRANATARIA	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza 	Cada vez que se usa
REFRIGERADORES	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura • Limpieza 	Diario Mensual
CONGELADOR	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura • Limpieza 	Diario Cuando se requiera
PARRILLAS	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza 	Cada vez que se usa
CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza 	Cada vez que se usa
AGITADOR	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza • Mantenimiento técnico 	Cada vez que se usa Anual

	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN	Identificación: LIN-CTE-01
		Versión: 0
		Fecha de creación: 02-Julio-2019
		Fecha actualización: 02-Julio-2019

5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El coordinador técnico y el responsable del equipo e instrumento, observaran que se lleve adecuadamente el mantenimiento correctivo cuando este es requerido, y monitorearan constantemente el buen funcionamiento del mismo.

El mantenimiento realizado por el técnico deberá ser documentado en el historial de cada equipo, al igual que la verificación de que efectivamente está funcionando en las condiciones adecuadas a los requerimientos del laboratorio

6. CALIBRACIÓN

Las calibraciones de los equipos se realizan en los periodos que el fabricante y/o instrumento señalan.

El responsable del equipo, llevara a cabo un registro de la calibración que se realice a los equipos de laboratorio. De tal manera que demuestre el buen funcionamiento del equipo del laboratorio.

	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN	Identificación: LIN-CTE-01
		Versión: 0
		Fecha de creación: 02-Julio-2019
		Fecha actualización: 02-Julio-2019

7. Historial de revisiones

No. Revisión	Descripción de la Revisión	Fecha de Revisión
0	Liberado	02/Julio/2019