



FORMATO

MANTENIMIENTO XP-300

Identificación:
FOR-HEM-02

Versión: 1

Fecha creación:
03/Octubre/2017

Fecha actualización:
30/Junio/2020

TENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

MES: _____ AÑO: _____

		Duración	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
DIARIO	Inspección visual de la trampa de líquidos y de ser necesario limpieza del líquido contenido, con el analizador apagado	1 min																																	
	Cerrar	10 min																																	
SEMANTAL	Enjuague automático	5 min																																	
	Limpieza del exterior del equipo	5 min																																	
QUINCENAL	Limpieza de SRV y estación de lavado cada 30000 ciclos (Válvula Dosificadora de Muestras) manual	15 min																																	
	Restaurar el contador de ciclo de la SRV	1 min																																	
	Limpieza de transductores	15 min																																	
REQUIERA	Limpieza de cámara de residuos a través del software, es necesario clorox blanco (Menú-Servicio-Mantenimiento- Limpieza de cámara de residuos)	10 min																																	
	Limpieza de membranas de transductores	5 min																																	
	Desechar el líquido de residuo	5 min																																	
	Drenar cámara TD	5 min																																	

OBSERVACIONES:

MARCA	FABRICANTE	NUMERO DE SERIE	FECHA DE RECEPCION	FECHA DE INICIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA
XP 300	SYSMEX - ROCHE	69848	Enero 2020	Febrero 2020		