



# FORMATO

## MANTENIMIENTO COBAS C303

**Identificación:**

**FOR-QCL-03**

**Versión: 1**

**Fecha creación:**

**04/Octubre/2017**

**Fecha actualización:**

**05/Marzo/2025**

MES Y AÑO:

| DIARIO   | 01       | 02 | 03 | 04 | 05 | 06       | 07 | 08 | 09 | 10 | 11       | 12 | 13 | 14 | 15 | 16       | 17 | 18 | 19 | 20 | 21       | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|--|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Procesamiento rack verde 2 y 3.  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Verificar ECO-D, NaOH, SMS.  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Verificar reactivos ISE.   |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Verificar Acid wash y Basic wash.  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| SEMANAL  | SEMANA 1 |    |    |    |    | SEMANA 2 |    |    |    |    | SEMANA 3 |    |    |    |    | SEMANA 4 |    |    |    |    | SEMANA 5 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Procesamiento rack verde 1, 2 y 3.   |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| QUINCENAL  | FECHA    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Limpieza de la aguja de reactivo y muestra.  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Limpieza de las boquillas de lavado.   |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Limpieza de las tapas de cubetas de reacción y de las tapas de agitadores ultrasónicos c303. |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Limpieza de las estaciones de lavado.  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Cambio de agua de baño de incubación.  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



# FORMATO

## MANTENIMIENTO COBAS C303

**Identificación:**

**FOR-QCL-03**

**Versión: 1**

**Fecha creación:**

**04/Octubre/2017**

**Fecha actualización:**

**05/Marzo/2025**

| MENSUAL  | FECHA | FECHA | FECHA | FECHA | FECHA |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Limpieza del contenedor de agua.                       |       |       |       |       |       |
| Desagüado del sifón del desgasificador.                |       |       |       |       |       |
| Comprobación del recipiente de dilución ISE.           |       |       |       |       |       |
| Realización del mantenimiento del sistema fotométrico. |       |       |       |       |       |
| Limpieza de filtro de la unidad de enfriamiento.       |       |       |       |       |       |
| BIMESTRAL  | FECHA | FECHA | FECHA | FECHA | FECHA |
| Cambio de electrodos de Na, K, Cl.                     |       |       |       |       |       |
| TRIMESTRAL   | FECHA | FECHA | FECHA | FECHA | FECHA |
| Lavado de los pasos de flujo ISE.                      |       |       |       |       |       |
| SEMESTRAL  | FECHA | FECHA | FECHA | FECHA | FECHA |
| Cambio del electrodo de referencia.                    |       |       |       |       |       |

Observaciones:

Responsable: Nombre y Firma

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_