



# FORMATO

## MANTENIMIENTO MAGLUMI 800

**Identificación:**  
**FOR-END-02**

**Versión: 1**

**Fecha creación:**  
**30/Septiembre/2024**

**Fecha actualización:**  
**30/Septiembre/2024**

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

MES: \_\_\_\_\_ AÑO: \_\_\_\_\_

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<b>DIARIO</b>	Realizar procedimiento de mantenimiento diario en: Pestaña Sistema/Mant.Diario/Ejecutar																																
	Restaurar el contador de cubetas																																
<b>SEMANAL</b>	Realizar procedimiento de mantenimiento semanal en: Pestaña Sistema/Mant.Semanal/Ejecutar																																
	Verificar nivel de las soluciones																																
<b>MENSUAL</b>	Realizar procedimiento de mantenimiento mensual en: Pestaña Sistema/Mant.Mensual/Ejecutar																																
	Limpieza del exterior del equipo																																
<b>REQUIERA</b>	Preparar Liquido de Sistema 6h antes de usar																																
	Desechar el líquido del contenedor de residuos																																

OBSERVACIONES:

MARCA	FABRICANTE	NUMERO DE SERIE	FECHA DE RECEPCION	FECHA DE INICIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA
Maglumi 800	Snibe Diagnostic	0101010012022400083	Septiembre 2024	Septiembre 2024		